

Produktdatenblatt

BCL[®] -Denta-Plac Hochkonzentrat Ultraschall-Zahnsteinlöser

Stand: 31.01.2023 * Druck: 20.08.2026

BESCHREIBUNG

WASSERLÖSLICHER ZAHNSTEINLÖSER
AUF SPEZIELLER WIRKSTOFFBASIS
ZUM ENTFERNEN VON
ZAHNSTEINABLAGERUNGEN
(PLAQUE-SCHICHTEN) AN ZAHNPROTHESEN
ZUM EINSATZ IN/BEI
ZAHNTECHNISCHEN LABORATORIEN,
ZAHNARZTPRAXEN,
ZAHNPROTHESENTRAGENDEN PATIENTEN

ANWENDUNG

EINSATZ IM ULTRASCHALLBAD/POLIERNADELBAD
1 TEIL PRODUKT
MIT 10 - 20 TEILEN WASSER VERDÜNNEN
EINWIRKZEIT BEI ALTEN STARKEN
SCHICHTEN BIS 1 STUNDE

EINSATZ DURCH EINLEGEN IN DIE LÖSUNG
1 TEIL PRODUKT MIT BIS 5 TEILE WASSER
IN DIE HEISSE ANWENDUNGSLÖSUNG
MINDESTENS 2 STUNDEN ODER ÜBER NACHT
EINLEGEN

KEINE ANWENDUNG AUF ELOXAL, ALUMINIUM
OHNE TEST UND BERATUNG



weitere Produktinformationen:

Erhalten Sie unter folgendem Link:
www.reinigungsprodukt.eu/*1581

 Made in Germany



UFI: FRC4-D00P-F004-N8GH




GEFAHR

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Dampf / Aerosol nicht einatmen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle verschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt / Behälter gemäß lokalen / nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Reiniger, 648/2004/EG, enthält

unter 5 % nichtionische Tenside
30 % und darüber Phosphate
Phosphorsäure

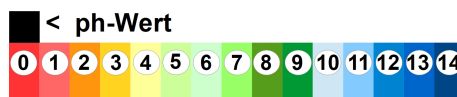

gefahrenlösender Stoff: Phosphorsäure

Produktnr: 1581

Da das Produkt nachhaltig wirkt, darauf achten das Produktreste
+ Verschüttungen unbedingt mit Wasser entfernt werden.

BCL[®]
AG
www.bcl-ag.de

Online-Shop> www.bcl-shop.de

Industriegebiet
Bürgermeister-Wiendl-Str 9
D-92439 Bodenwöhr

Tel: +49(0)9434-20.398.0
Fax: +49(0)9434-20.398.29
eMail: office@bcl-mail.de