

# Produktdatenblatt

## BCL<sup>®</sup> -Denta-Sensitiv Hochkonzentrat Ultraschall-Zahnsteinlöser für Allergiker

Stand: 20.08.2026 \* Druck: 20.08.2026

### BESCHREIBUNG

ZUR REINIGUNG VON SCHIENEN UND ALLEN PROTHESENKUNSTSTOFFEN, INSBESONDERE BIO-HPP-, PEEK-, NYLON-PROTHESEN, FÜR ALLERGIKER GEEIGNET ZUM ENTFERNEN VON ZAHNSTEINABLAGERUNGEN, BELÄGEN UND VERFÄRBUNGEN, WIE TEE, NIKOTIN UND KAFFEE BLEICHT DEN PROTHESENKUNSTSTOFF NICHT AUS - ZUM EINSATZ IM ZAHNTECHNISCHEN BEREICH

### ANWENDUNG

EINSATZ IM ULTRASCHALLBAD UND NADELBAD  
1 TEIL PRODUKT MIT BIS ZU 20 TEILEN WASSER  
VERDÜNNEN  
EINWIRKZEIT BEI ALTEN STARKEN SCHICHTEN BIS 1 STUNDE

DANACH DIE PROTHESEN UNTER FLIEßENDEM WASSER GRUENDLICH ABWASCHEN  
KEINE ANWENDUNG AUF ELOXAL, ALUMINIUM OHNE TEST UND BERATUNG



### weitere Produktinformationen:

Erhalten Sie unter folgendem Link:  
[www.reinigungsprodukt.eu/\\*1592](http://www.reinigungsprodukt.eu/*1592)

 Made in Germany



UFI: MPD4-X0M1-T00K-W0W7

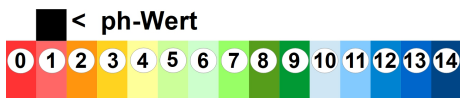


Gefahr

**Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt / Behälter gemäß lokalen / nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.**

### Reiniger (648/2004EG) enthält

< 5 % nichtionische Tenside  
Duftstoffe

 < ph-Wert



Produktnr: 1592

Da das Produkt nachhaltig wirkt, darauf achten das Produktreste  
+ Verschüttungen unbedingt mit Wasser entfernt werden.

**BCL<sup>®</sup>**  
AG  
[www.bcl-ag.de](http://www.bcl-ag.de)

Online-Shop> [www.bcl-shop.de](http://www.bcl-shop.de)  
Industriegebiet  
Bürgermeister-Wiendl-Str 9  
D-92439 Bodenwöhr

Tel: +49(0)9434-20.398.0  
Fax: +49(0)9434-20.398.29  
eMail: [office@bcl-mail.de](mailto:office@bcl-mail.de)