

Produktdatenblatt

BCL[®]-Impress-Dent

anwendungsfertig
für die Reinigung von 3D-Druck-Material und Abdrucklöffel

Stand: 16.01.2023 * Druck: 20.08.2026

BESCHREIBUNG

SPEZIALPRODUKT ZUR ENTFERNUNG VON
ABLAGERUNGEN AUF 3D-DRUCK-
MATERIAL(SLA,DLP,LCD)
UND ABDRUCKLÖFFEL
LÖST HAFTVERMITTLER, KLEBRIGE RÜCKSTÄNDE
IM TAUCHBAD ODER OPTIMAL IM ULTRASCHALLBAD
MEHRFACH VERWENDBAR

ANWENDUNG

DAS ZU REINIGENDE OBJEKT IN DAS TAUCHBAD
LEGEN
20-30 MINUTEN EINWIRKEN LASSEN
EVENTUELL MIT EINEM PAPIERTUCH NACHREIBEN
UND VORGANG WIEDERHOLEN
OBJEKT NACH DER REINIGUNG MIT WASSER
ABSPÜLEN UND ABTROCKNEN ODER MIT LUFT
ABBLASEN.

OPTIMALER EINSATZ IM ULTRASCHALLBAD:
10-15 MINUTEN BEI 30-40 GRAD



weitere Produktinformationen:

Erhalten Sie unter folgendem Link:
www.reinigungsprodukt.eu/*4221

 Made in Germany



UFI: CDPC-K06Q-100M-YGVU




Gefahr



**Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und
Benommenheit verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung
oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von
Kindern gelangen. Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen
Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen
halten. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz
tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter spülen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt
anrufen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt / Behälter gemäß lokalen /
nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.**

Reiniger (648/2004EG) enthält

Propan-2-ol
< 5% anionische Tenside

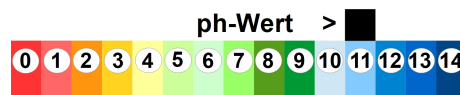

gefahrenslösender Stoff: Propan-2-ol 4-tert-
Butylcyclohexylacetat EUH208 Kann allergische

Produktnr: 4221

Da das Produkt nachhaltig wirkt, darauf achten das Produktreste
+ Verschüttungen unbedingt mit Wasser entfernt werden.

BCL[®]
AG
www.bcl-ag.de

Online-Shop> www.bcl-shop.de

Industriegebiet
Bürgermeister-Wiendl-Str 9
D-92439 Bodenwöhr

Tel: +49(0)9434-20.398.0
Fax: +49(0)9434-20.398.29
eMail: office@bcl-mail.de