

Produktdatenblatt

BCL-Quat-Des® Hochkonzentrat Desinfektionspräparat, VAH-gelistet

Stand: 31.01.2023 * Druck: 21.08.2026

BESCHREIBUNG

FÜR DIE DESINFEKTION VON ALLEN
ABWASCHBAREN OBERFLÄCHEN GEEIGNET
WIRKUNG:

BAKTERIZID, LEVUROZID,
VIRUSINAKTIVIEREND (behüllte Viren)

- ALKOHOLFREI
- GERUCHSNEUTRAL

**ABDRUCK-DESINFEKTIONSPRÄPARAT,
KEINE OBERFLÄCHENBESCHÄDIGUNG,
KEINE DIMENSIONSVERÄNDERUNG, KEIN
VERFÄRBN AN ABDRÜCKEN,
GIPSMODELLEN, GUTER INDIKATOR ZUR
DESINFEKTION VON BIMSSTEIN, FEUCHT
HALTEN BLEIBT ÜBER WOCHEN HELL
AUSWECHSELN DES BIMSSTEINS NUR
NACH,VERSCHLEISS GUTE
MATERIALVERTRÄGLICHKEIT,
FÜR DEN DESINFEKTIONSAUTOMATEN
GEEIGNET,
FÜR GETRAGENE PROTHESEN GEEIGNET**

ANWENDUNG

TAUCHBAD-, SCHEUER-WISCH-
FLÄCHENDESINFEKTION (ZWEI-EIMER-
METHODE)

SCHNELLDESINFEKTION UND
FLÄCHENDESINFEKTION

EINWIRKZEIT BEI RAUMTEMPERATUR
7,50-%-ige LÖSUNG 1-MINUTE (1 + 12)
zur alkoholfreien Schnelldesinfektion
5,00-%-ige LÖSUNG 5-MINUTEN (1 + 19)
4,00-%-ige LÖSUNG 10-MINUTEN (1 + 24)
2,00-%-ige LÖSUNG 15-MINUTEN (1 + 49)
1,00-%-ige LÖSUNG 1-STUNDE (1 + 99)
0,75-%-ige LÖSUNG 4-STUNDEN (1 + 132)
(1 TEIL BCL-Quat-Des und ?? Teile
Trinkwasser)

baua: N-118899

weitere Produktinformationen:

Erhalten Sie unter folgendem Link:
www.reinigungsprodukt.eu/*140A



Gefahr



Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dampf / Aerosol nicht einatmen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLÜCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle verschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Reiniger, 648/2004/EG, enthält

< 5% nichtionische Tenside
Desinfektionsmittel

Biozid(528/2012/EG) enthält

3,33 g/100g Didecyldimethylammoniumchlorid
6,66 g/100g Quaternäre
Ammoniumverbindungen,
Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-,Chloride

ProduktCode: 140A

Da das Produkt nachhaltig wirkt, darauf achten das Produktreste
+ Verschüttungen unbedingt mit Wasser entfernt werden.

BCL®
AG
www.bcl-ag.de

Online-Shop> www.bcl-shop.de

Industriegebiet
Bürgermeister-Wiendl-Str 9
D-92439 Bodenwöhr

Tel: +49(0)9434-20.398.0
Fax: +49(0)9434-20.398.29
eMail: office@bcl-mail.de