

Produktdatenblatt

Plac-Cleaner Hochkonzentrat Prothesenreiniger zur täglichen Pflege

Stand: 31.12.2022 * Druck: 20.08.2026

BESCHREIBUNG

Wasserlösliches Hochkonzentrat zur Reinigung von Zahnprothesen. Entfernt alle Beläge und Verfärbungen wie Zahnstein, Tee, Nikotin und Kaffee. Das Produkt ist chlorfrei und bleicht den Prothesenkunststoff nicht aus.

Die Reinigungslösung reicht für maximal 1 Woche.

ANWENDUNG

Füllen sie 10 ml Produkt (Inhalt des Dosierkopfes) in den herausnehmbaren Kunststoffbehälter, legen sie Ihren Zahnersatz in den Behälter und füllen sie diesen mit warmen Wasser auf.

Die Reinigung der Prothese soll täglich 5 - 10 Minuten erfolgen.

Anschließend sollten sie den Zahnersatz gründlich unter klarem Wasser abspülen. Vor der Anwendung Essensreste mit einer Prothesenbürste entfernen.

Optimales Mischungsverhältnis
1 Teil Produkt + 15 Teile Wasser



weitere Produktinformationen:

Erhalten Sie unter folgendem Link:
www.reinigungsprodukt.eu/*8581

 Made in Germany



UFI: QRRR-A0KH-F009-2WK4




GEFAHR

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Dampf / Aerosol nicht einatmen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle verschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt / Behälter gemäß lokalen / nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Reiniger (648/2004EG) enthält

unter 5 % nichtionische Tenside
30 % und darüber Phosphate
Phosphorsäure

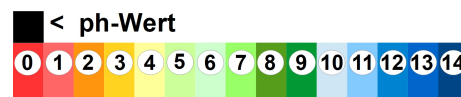

gefahrenlösender Stoff: Phosphorsäure

Produktnr: 8581

Da das Produkt nachhaltig wirkt, darauf achten das Produktreste + Verschüttungen unbedingt mit Wasser entfernt werden.

BCL[®]
AG
www.bcl-ag.de

Online-Shop> www.bcl-shop.de

Industriegebiet
Bürgermeister-Wiendl-Str 9
D-92439 Bodenwöhr

Tel: +49(0)9434-20.398.0
Fax: +49(0)9434-20.398.29
eMail: office@bcl-mail.de