

Verdünnungstabelle

Bereich Dental - Desinfektionspräparate



BCL-Quat-Des, Hochkonzentrat, Desinfektionspräparat (VAH-gelistet), begrenzt viruzid
Für alle abwaschbaren Oberflächen geeignet.

Abdruckdesinfektion, Tauchbaddesinfektion, Schnell- und Sprühdesinfektion, Scheuer- und Wischdesinfektion, Flächendesinfektion, Bimssteindesinfektion, für den Desinfektionsautomaten und für Alginate geeignet

Alkoholfrei

Geruchsneutral

Materialschonend

Biologisch abbaubar

Mischungs- verhältnis	0,75%	1,00%	2,00%	4,00%	5,00%	7,50%
0,5 l	3,75 ml	5,00 ml	10,00 ml	20,00 ml	25,00 ml	37,50 ml
0,75 l	5,62 ml	7,50 ml	15,00 ml	30,00 ml	37,50 ml	56,25 ml
1 l	7,50 ml	10,00 ml	20,00 ml	40,00 ml	50,00 ml	75,00 ml
1,5 l	11,25 ml	15,00 ml	30,00 ml	60,00 ml	75,00 ml	112,50 ml
5 l	37,50 ml	50,00 ml	100,00 ml	200,00 ml	250,00 ml	375,00 ml
10 l	75,00 ml	100,00 ml	200,00 ml	400,00 ml	500,00 ml	750,00 ml
Einwirkzeit	4 Stunden	1 Stunde	15 Minuten	10 Minuten	5 Minuten	1 Minute

Empfohlene Anwendungslösung

Abdruckdesinfektion:	4%-ige oder 5%-ige Lösung	Tauchbaddesinfektion:	4%-ige oder 5%-ige Lösung
Schnell- und Sprühdesinfektion:	7,5%-ige Lösung	Flächendesinfektion:	7,5%-ige Lösung
Scheuer-Wisch- Desinfektion:	7,5%-ige Lösung	Bimssteindesinfektion	4%-ige Lösung
Entspannungsmittel (Alginate)	4%-ige oder 5%-ige Lösung		

Wichtige Hinweise

Die Oberflächen müssen nicht nass sein.
Auch nach dem Verdunsten des Wassers bleiben die Desinfektionswirkstoffe auf der Oberfläche haften.
Wichtig ist, die Einwirkzeit zu beachten.
Nach der Einwirkzeit das Objekt kurz mit klarem Trinkwasser nachspülen, um restliche Wirkstoffe sowie abgetötete Mikroorganismen zu entfernen.
Hinweis: Nach einem kurzen Tauchbad kann das Objekt außerhalb des Tauchbades ruhen.
Durch die kurze Einwirkzeit von 1 Minute als Ersatz für eine alkoholische Schnelldesinfektion geeignet.

Sicherheitsdatenblatt beachten!