



Wirkungsbereich und Beschreibung

BCL-Quat-Des[®] Desinfektionspräparat (VAH gelistet) Flüssiges Hochkonzentrat zur Flächendesinfektion und Reinigung



Beschreibung

BCL-Quat-Des[®] ist ein Kombinationspräparat auf Basis quartärer Ammoniumverbindungen.

Es eignet sich zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar, Medizinprodukten sowie abwaschbaren, nicht porösen Flächen.

Besonders geeignet ist das Produkt für hygienisch anspruchsvolle Bereiche, in denen eine störende Geruchsbelästigung vermieden werden soll.



Vorteile auf einen Blick

- ✓ Alkoholfrei
- ✓ Parfümfrei
- ✓ Frei von Aldehyden und Phenolen
- ✓ Gute Materialverträglichkeit
- ✓ Auch für Acrylglas geeignet

WIRKUNGSSPEKTRUM UND EINWIRKZEITEN

Prüfgegenstand	Norm	Belastung	1 min	5 min	15 min	30 min	60 min
bakterizid ¹ , levurozid	VAH / EN 16615	mit Mechanik, hohe Belastung	7,5% ²		2,5%	1%	
begrenzt viruzid	EN 14476	niedrige und hohe Belastung	7,5%		2%		1%
Ergänzende Prüfergebnisse							
bakterizid	EN 13697	hohe Belastung		0,75%			
	EN 13727	hohe Belastung		3%	1,5%	1%	
	EN 16615	hohe Belastung	7,5%		2,5%	1%	
	EN 17387	hohe Belastung		2%			
	EN 1276	hohe Belastung		0,5%			
	EN 1276	niedrige Belastung		0,25%			
levurozid (C. albicans)	EN 13624	hohe Belastung	3%	0,75%	0,5%		
	EN 13624	niedrige Belastung		0,25%	0,1%		
	EN 13697 (modifiziert)	hohe Belastung		2%			
	EN 16615	hohe Belastung	7,5%		2,5%	1%	
	EN 17387	hohe Belastung		4%	3%		
	EN 1650	hohe Belastung		0,75%	0,25%		
	EN 1650	niedrige Belastung		0,25%			
wirksam gegen Polyomaviren	EN 14476	hohe Belastung		5%		2%	
wirksam gegen Noroviren	EN 14476	hohe Belastung					7,5%

1 – einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)

2 – VAH gelistet 5 Min. Wert