

BCL®-Denta-Plac

ZUR ENTFERNUNG VON ZAHNSTEINABLAGERUNGEN, PLAC-SCHICHTEN UND
OXYDSCHICHTEN AN ZAHNPROTHESEN
LÖST ALLE MATERIALIEN MIT ABLAGERUNGEN, DIE MINERALISCH SIND
UMWELTVERTRÄGLICHE ENTSORGUNG ÜBER DIE KANALISATION

Arbeitshilfe-Zusammenfassung

Verwendung:	Anwendung:
- zur professionellen Reinigung von Zahnprothesen - entfernt alle Beläge und Verfärbungen, wie Zahnstein und Plac-Schichten - löst alle mineralischen Rückstände - für das Ultraschallbad, Nadelbad und Tauchbad geeignet Bei starken Ablagerungen Vorgang wiederholen	- im Ultraschallbad - im Nadelbad - im Tauchbad danach mit klarem Wasser abspülen Bei starken Ablagerungen Vorgang wiederholen
	Verdünnung anwendungsfertige Lösung
	Produkt verdünnen > für 1 Liter: 91,00 ml Produkt 809 ml warmes Wasser > für 5 Liter: 454,50 ml Produkt 4545,50 ml warmes Wasser > für 10 Liter: 909,00 ml Produkt 9091,00 ml warmes Wasser
Besonderer Hinweis:	
chlorfrei und bleicht den Prothesenkunststoff nicht aus Produkt ist nicht für alle Oberflächen geeignet Keine Anwendung auf Eloxal und Aluminium	
Achtung:	Arbeitssicherheit-Symbole:
GEFAHR H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.	
Kennzeichnung Lieferform:	Kennzeichnung Anwendung:
	Kennzeichnung Anwendung: 