

Anwendung als Tauchbad (kein Ultraschallbad)

1. Das zu reinigende Objekt in die Lösung (Tauchbad) legen und ca. 20 – 30 Minuten einwirken lassen.
2. Bei sehr starken Verunreinigungen oder bei Bedarf das Objekt nach jeweils ca. 10 Minuten mit einem Papiertuch leicht abreiben (= Entfernung von Schichten). Diesen Vorgang bis zum gewünschten Ergebnis wiederholen.
3. Objekt mit klarem Wasser abspülen und mit Luft abblasen oder mit einem Tuch abtrocknen.

Anwendung im Ultraschallbad

1. Behälter mit dem Produkt füllen und im Ultraschallbad vorwärmen.
Temperatur Ultraschallbad 30 – 40 Grad.
2. Das zu reinigende Objekt in das Produkt einlegen und ca. 10 – 15 Minuten einwirken lassen.
3. Bei sehr starken Verunreinigungen oder bei Bedarf das Objekt nach jeweils ca. 5 Minuten Einwirkzeit mit einem Papiertuch leicht abreiben (= Entfernung von Schichten). Diesen Vorgang bis zum gewünschten Ergebnis wiederholen.
4. Objekt mit klarem Wasser abspülen und mit Luft abblasen oder mit einem Tuch abtrocknen.

Empfohlene Anwendung:

- Geeignet zum Reinigen von Abdrucklöffeln
(Beim einlegen in die Lösung immer geschlossene Oberfläche nach oben).
- 3D-Druck-Material/Druckresinen/Druckharze wie SLA, DLP, LCD
- Entfernung von Haftvermittlern
- Entfernung von klebrigen Materialien auf Oberflächen

wichtiger Hinweis:

- das gereinigte Produkt immer mit klarem Wasser abspülen!

BCL Aktiengesellschaft Bürgermeister-Wiendl-Straße 9 D-92439 Bodenwöhr	Telefon: +49(0)9434 – 20398-0 Telefax: +49(0)9434 – 20398-28 http://www.bcl-ag.de	Erstellt durch: Jürgen Klostermayr	Erstellt am: 11.07.2022	Überarbeitet am:
---	--	---------------------------------------	----------------------------	------------------