

BCL®-Deposit-X

SPEZIALPRODUKT ZUR ENTFERNUNG VON STARKEN ABLAGERUNGEN WIE ZAHNSTEIN,
EIWEISS- UND KALKABLAGERUNGEN.

**ENTFERNT AUCH FLUGROST AN NICHT PORÖSEN OBERFLÄCHEN.
PRODUKT VORSICHTIG UND NUR UNTER AUFSICHT ANWENDEN.**

Arbeitshilfe-Zusammenfassung

Verwendung:	Anwendung:
- zur professionellen Reinigung von Prothesen - entfernt starke Beläge und Verfärbungen, wie Zahnstein und Plac-Schichten - löst alle mineralischen Rückstände - für das Ultraschallbad und Nadelbad geeignet Bei normalen bis mittelstarken Ablagerungen BCL®-Denta-Plac verwenden.	- im Ultraschallbad - im Nadelbad - im Tauchbad danach mit klarem Wasser abspülen Bei starken Ablagerungen Vorgang wiederholen
Besonderer Hinweis:	Verdünnung anwendungsfertige Lösung
chlorfrei und bleicht den Prothesenkunststoff <u>nicht</u> aus Produkt ist nicht für alle Oberflächen geeignet Keine Anwendung auf Eloxal und Aluminium	Produkt verdünnen > für 1 Liter: 91,00 ml Produkt 909 ml warmes Wasser > für 5 Liter: 454,50 ml Produkt 4545,50 ml warmes Wasser > für 10 Liter: 909,00 ml Produkt 9091,00 ml warmes Wasser
Achtung:	Arbeitssicherheit-Symbole:
GEFAHR H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H318 Verursacht schwere Augenschäden.	
Kennzeichnung Lieferform:	Kennzeichnung Anwendung:
	