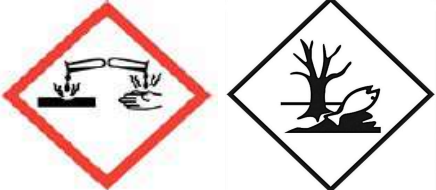


REGOsept (begrenzt viruzid)

ABDRUCKDESINFEKTION, TAUCHBADDESINFEKTION, FLÄCHENDESINFEKTION, SCHNELL- UND SPRÜHDESINFEKTION, SCHEUER- UND WISCHDESINFEKTION, BIMSSTEINDESINFEKTION, INSTRUMENTENDESINFEKTION; ABSAUGANLAGENDESINFEKTION;
FÜR DESINFEKTIONSAUTOMATEN UND ALGINATE GEEIGNET
UMWELTVERTRÄGLICHE ENTSORGUNG ÜBER DIE KANALISATION

CE-Kennzeichnung (Medizinprodukt) nur notwendig bei Produkten mit DIREKTER Verwendung AN oder IM Menschen!

Arbeitshilfe-Zusammenfassung

Verwendung:	Anwendung:
- alkoholfreie Desinfektion zur wirksamen Desinfektion von Abformungen, Alginaten, Abdrücken, Flächen, Bimsstein, Instrumenten und Absauganlagen - für das Tauchbad, in einem Handsprühergerät als Sprühdesinfektion - im Desinfektionsautomaten, für den Hygojet geeignet - Keine Beeinträchtigung der Dimensionsstabilität oder Gipskompatibilität - in der gesamten Dentaltechnik anwendbar	Oberfläche mit anwendungsfertiger Lösung einsprühen, ca. 1 bis 5 Minuten einwirken lassen, danach mit klarem Wasser abspülen
Besonderer Hinweis:	Verdünnung anwendungsfertige Lösung
Erhöhte Präzision des Meistermodells aus Gips durch effektive Reinigungswirkung. Produkt ist für alle Oberflächen geeignet. Keine Geruchsbelästigung durch alkoholische Dämpfe.	Produkt verdünnen: Alkoholfreie Schnelldesinfektion 7,5%ige, > für 1 Liter: Einwirkzeit 1 Minute 75 ml Produkt 925 ml warmes Wasser Alkoholfreie Flächendesinfektion 7,5%ige, > für 1 Liter: Einwirkzeit 1 Minute 75 ml Produkt 925 ml warmes Wasser Alkoholfreie Scheuer-Wischdesinfektion 7,5%ige, > für 1 Liter: Einwirkzeit 1 Minute 75 ml Produkt 925 ml warmes Wasser Alkoholfreie Abdruckdesinfektion 5%ige, > für 1 Liter: Einwirkzeit 5 Minuten 50 ml Produkt 950 ml warmes Wasser Alkoholfreie Tauchbaddesinfektion 5%ige, > für 1 Liter: Einwirkzeit 5 Minuten 50 ml Produkt 950 ml warmes Wasser
Achtung:	Arbeitssicherheit-Symbole:
GEFAHR H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.	
Kennzeichnung Lieferform:	Kennzeichnung Anwendung:
	Kennzeichnung Anwendung: Diese anwendungsfertige Lösung (Verdünnung nach Empfehlungsbereich) ist nicht kennzeichnungspflichtig. Es ist kein Gefahrenpiktogramm erforderlich.